

NICE



Бескомпромиссное решение
для тонких альвеолярных гребней

 AlphaBio^{TEC}
Implantology

Сверление прямым сверлом

Ø Диаметр	Мягкая кость IV типа	Средней твёрдости кость II и III типов	Твёрдая кость I типа
Ø 3.2	2.0	2.0 2.8 *	2.0 2.8 2.8/3.0

* При наличии глубокого кортикального слоя воспользуйтесь сверлом 3,0 мм и просверлите им только кортикальную вершину гребня. Ступенчатое сверло можно заменить прямым сверлом за счет сверления на 3 мм короче планируемой длины имплантата.

Прямое
сверло с
покрытием

