



Протокол сверления



Сверление ступенчатым сверлом

Ø Диаметр	Мягкая кость IV типа	Средней твёрдости кость II и III типов
Ø 3.7N	2.0 2.0/2.4	2.0 2.4/2.8 2.8/3.2
Ø 3.75	2.0 2.4/2.8	2.0 2.4/2.8 2.8/3.2
Ø 4.2	2.0 2.4/2.8 2.8/3.2	2.0 2.4/2.8 3.2/3.65
Ø 4.65	2.0 2.4/2.8 3.2/3.65	2.0 2.4/2.8 3.2/3.65 3.65/4.1
Ø 5.3	2.0 2.4/2.8 3.2/3.65 3.65/4.1	2.0 2.4/2.8 3.2/3.65 3.65/4.1 4.5/4.8





Протокол сверления



Сверление прямым сверлом

Ø Диаметр	Мягкая кость IV типа	Средней твёрдости кость II и III типов
Ø 3.7N	2.0	2.0
	2.4*	2.8
		3.2*
Ø 3.75	2.0	2.0
	2.4	2.8
	2.8*	3.2*
Ø 4.2	2.0	2.0
	2.8	2.8
	3.2*	3.2
Ø 4.65		3.65*
	2.0	2.0
	2.8	2.8
	3.2	3.2
	3.65*	3.65
Ø 5.3		4.1*
	2.0	2.0
	2.8	2.8
	3.2	3.2
	3.65	3.65
	4.1*	4.1
		4.5
		4.8*



Прямое
сверло с
покрытием

* на 3 мм короче длины имплантата. Прямое сверло можно заменить соответствующим ступенчатым сверлом на всю длину имплантата. См. протокол работы ступенчатым сверлом.